

“緯創醫學科技”機械式助行器(未滅菌)

**“Wistron Medical Technology” Mechanical Walker
(Non-Sterile)**



1

藥商名稱：緯創醫學科技股份有限公司
藥商地址：新竹市東區科學工業園區新安路5號5樓

TY BIOPHARM
台灣東洋藥品

販賣業醫療器材商名稱：台灣東洋藥品工業股份有限公司
販賣業醫療器材商地址：台北市南港園區街3-1號3樓
客服電話：0800-222-166

產品規格

型號	BestShape AirWalk
材質	鐵製
淨重	60 公斤
尺寸(長 x 寬 x 高)	117 x 63~105 x 87~187 公分
萬向輪軸開合寬度	63~105 公分
最大耐重	180 公斤
電源輸入	110~220V ; 5A
電池使用時間	電池充飽時可升降 60 次
用途	流暢穩定的步行訓練懸吊設備，搭配綁帶使用能減輕使用者下肢承重，防止使用者下肢無力導致跌倒風險。同時促進重心轉移進行動態平衡控制



警告事項

- ◆ 未經使用者的當責的醫療人員如：醫師、治療師、護理師同意前，請勿擅自移動病人。
- ◆ 在未熟練使用本產品前，請勿以病人作為練習對象。
- ◆ 初期使用本產品時，須由當責的醫療人員在旁指導。
- ◆ 本產品之售後服務，請與本公司授權之經銷商或本公司聯繫，切勿擅自拆卸、維修內部零件。




注意事項

- ◆ 使用本產品之前，請先仔細閱讀本手冊，以便能正確的操作及維護本產品。
- ◆ 電池用量顯示電池容量以即時充電，建議每週至少一次連續充電 8 小時。

安全需知

- ◆ 首次使用本產品時，請先空機練習操作一次，並先向使用者解釋操作方法，再進行實務的操作，以確保使用者安全。
- ◆ 須經由醫療專業人員評估後方可使用本產品。
- ◆ 請使用本廠牌綁帶以確保安全。
- ◆ 操作人員保持在本產品的中央對稱位置，並應讓使用者面對操作人員，位於吊臂架中心下方，以維持機台的穩固及使用者及操作人員的安全。
- ◆ 本產品最大負載重量為 180 公斤，並不得負載患者以外之其他重物。
- ◆ 在操作本產品吊臂上升或下降時，請注意本產品周遭是否有尖銳危險的物品。
- ◆ 本產品之零組件若有損壞或遺失時，請務必向經銷商或本公司洽談購買更換，請勿使用其他廠牌規格或替代之零組件，以免發生危險。
- ◆ 請勿在使用者和本產品中放置任何東西，例如軟墊、保護墊等，因而影響使用者使用安全性。
- ◆ 每季應請相關人員完整的檢測本產品一次，以確認是否有磨損，或是零件鬆脫等狀況發生。
- ◆ 吊臂靠近患者時須注意，小心勿撞擊使用者身體部位。
- ◆ 本產品進行充電時，請勿使用。


主機介紹

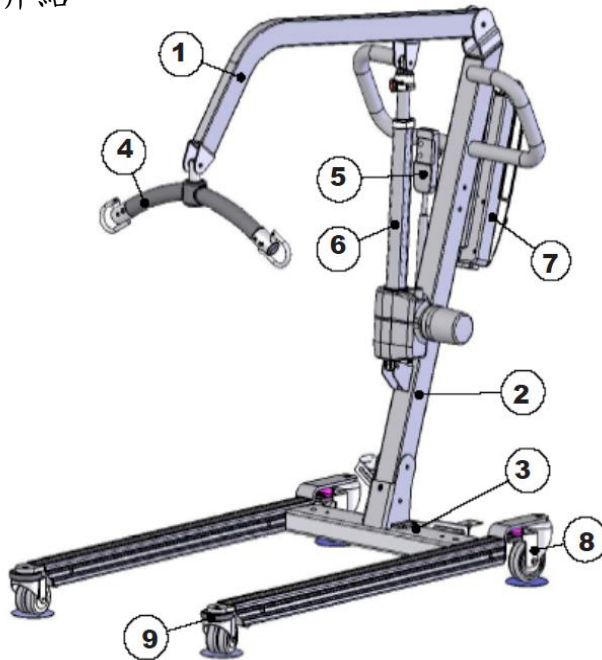





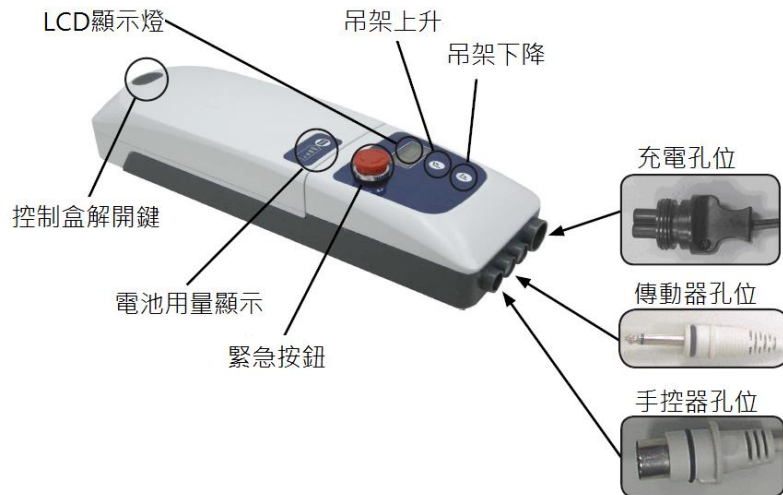

1. 吊臂
2. 立管
3. 基座
4. 綁帶吊架
5. 手控器
6. 傳動器
7. 控制盒
8. 煞車輪
9. 前輪






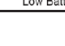
控制盒介紹：

緊急按鈕以順時針開啟電源，按下即關閉電源



電池用量顯示介紹

   Low Batt.
 超過負載
 電池容量
 過度使用
low battery 低電量(閃爍)

	容量	狀 態
	90%	90%電量
	70%	70%電量
	50%	50%電量, 立即充電
	25%	25%電量, 立即充電
	10%	10%電量, 警鈴聲
	0%	0%電量